

FICHE TECHNIQUE

Référence : Masque barrière anti projection lavable à 60° ou plus pendant 30 minutes

Désignation : 100 % polyamide

Conditionnement : Boîte carton

Caractéristiques techniques : Référence 128/13 testée catégorie 1 par la DGA :

Perméabilité à l'air -> 607

Efficacité de protection aux aérosols particules 3um -> 92

Interlock fin composé de polyamide 66

Cette matière au delà de ses qualités techniques est, par sa douceur, particulièrement confortable, et par sa légèreté adaptée aux fortes chaleurs.

Allongements : L +320% - H +205%

Ce masque est élastique ce qui lui permet de s'adapter parfaitement à la physionomie de chaque visage



Changer toutes les 4 heures

Laver avant la première utilisation puis après chaque utilisation





-> Vidéo d'explication pour la pose :

<https://www.youtube.com/watch?v=1EEPk8J04IE>

ETS MALTERRE Route de Thennes, 80110 MOREUIL

Les masques sont de taille unique

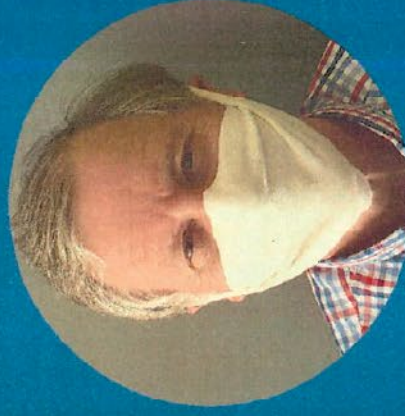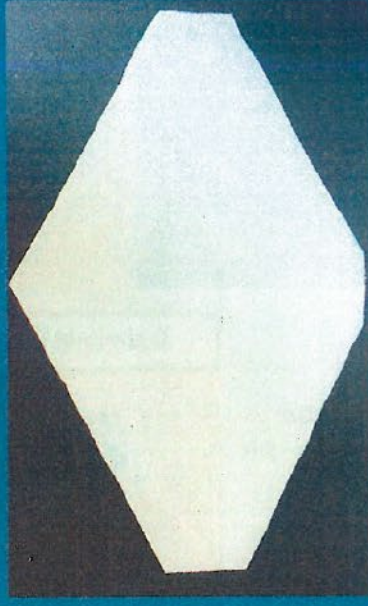

S'ils sont grands, vous pouvez les ajuster à votre visage en découpant le surplus de tissu tout en conservant la forme du masque

Masque tricoté et confectionné

en France



Masque sans couture



Ets. **Malterre**
SARL

Sans
Couture

Masque tricoté
et confectionné
en France 

Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1*

Sans
Couture

Selon la note
d'information
du 29 mars
2020



Matériau dont les performances ont été **mesurées et validées** par les laboratoires de **DGA*** Maitrise NRBC, 5 Rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP 20-2591/DGA MNRBC/2000305/NP).

- ▶ Efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m} > 92\%$
- ▶ Perméabilité à l'air pour une dépression de $100\text{Pa} > 607\text{L.m}^{-2}\text{s}^{-1}$
Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures

Objectifs :

- Rassurer le porteur : le masque a des performances en filtration et en perméabilité à l'air. **Il doit être changé toutes les 4 heures** ;
- Protège contre les agents infectieux transmissibles par voies gouttelettes ;

Précautions et mode d'emploi :



1 LAVAGE AVANT UTILISATION Un lavage avant première utilisation puis lavable cinq fois	2 BIEN AJUSTER Vous laver les mains puis découper les orifices pour les oreilles en fonction de votre physionomie	3 LE MASQUE A UN SENS Le côté le plus pointu doit se positionner au niveau du nez en revanche il n'a ni endroit ni envers	4 LAVAGE APRÈS UTILISATION Lavage à 60° (ou plus) pendant 30 minutes
---	--	--	--

Vidéo d'explication pour poser le masque :



→ Me scanner avec l'appareil photo



Ou entrer le lien suivant sur internet :

<https://www.youtube.com/watch?v=1EEPk8J04iE>

*Catégorie 1 = masque individuel à usage des professionnels et particuliers en contact avec le public

*DGA = Direction générale des armées

Technique de pose



1er étape :

Tendre fort le masque en enveloppant bien le menton et le positionner au niveau de vos oreilles pour repérer ou faire les trous



2ème étape :

Aux repères plier puis découper aux ciseaux pour faire les trous



3ème étape :

Insérer deux doigts dans chacun des trous puis effectuer un pivot vers l'arrière



4ème étape :

Effectuer un pli au niveau du nez et ajuster le masque à votre convenance